

Anleitung zum Batteriewechsel 9S-BUT-05-02 Nurse Call Point

Für einen Batteriewechsel im Nurse-Call-Point gehen Sie wie folgt vor:

1. Den Nurse-Call Point vorsichtig abnehmen → Klettverschluss!
2. die 4 Schrauben auf der Rückseite des Gehäuses mit einem T6 Torx-Schraubendreher öffnen
3. Die Batterie vorsichtig herauschieben – siehe Abbildung unten
ACHTUNG: Batterien dürfen sich nicht gegenseitig berühren,
Batterien dürfen keine anderen Komponenten berühren!
4. Zwei neue Knopfzellen des Typ CR-2450 einsetzen → Polung beachten!
5. Nurse-Call-Point Gehäuse wieder zuschrauben
6. Das Gerät wieder am Klettverschluss befestigen

