

9Solutions eTag Pro

9Solutions eTag Pro ist ein einfach zu bedienender Echtzeit Quittierungs- und Notruftaster für Pflegende in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Produkteigenschaften

- eTag Pro ist Freisprecheinrichtungs-kompatibel
- eTag Pro wird zusammen mit Systemen von 9Solutions in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und in der Hauskrankenpflege eingesetzt
- eTag Companion verfügt über zwei farbige, programmierbare Tasten und ein Bestätigungslicht
- Der Tag dient zur Rufbestätigung des eTag Companion sowie für den Assistenzruf im Notfall
- Standardmäßig wird der eTag Pro mit Ansteckclip ausgeliefert, kann jedoch optional auch mit Armband oder Halsband getragen werden



| Technische Informationen | |
|---------------------------------------|---|
| Produktnummer | 9S-TAG-08-01 |
| Tasten | 2 |
| LED-Anzeige | 1 |
| Schutzart | IP67 (Dusche) |
| Gewicht | 15 g |
| Abmessungen | 42 x 9,5 mm (ø x h) |
| Batterie-Lebensdauer | ca. 1-2 Jahre (betriebsabhängig) |
| Batterietyp | CR-2450 Lithium Batterie |
| Frequenz | Bluetooth, 2.4 GHz, ISDM Band 2400-2483,5 MHz |
| Ausgangsleistung | 4 dBm |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +55°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis +70°C |
| Zubehör | |
| Trageclip | 9S-ACC-01-36 |
| Armband flexibel, wiederverschließbar | 9S-ACC-01-13 |

Aktivierung und Deaktivierung der Zugangskontrolle der eTags zu einem Gate

Mit eTag Pro und eTag Companion wird eine Zugangskontrolle mit folgender Druckfolge **aktiviert: 4-3-2-2**.
Mit eTag Pro und eTag Companion wird eine Zugangskontrolle mit folgender Druckfolge **deaktiviert: 4-3-2-3**.


Am **eTag Pro** ist dafür die **blaue Taste** zu drücken, am **eTag Companion** ist die **graue Taste** zu drücken.

Aktivierung

1. Drücken Sie die kleine Taste viermal – die **grüne LED** leuchtet auf
2. Drücken Sie die kleine Taste dreimal – die **grüne LED** leuchtet auf
3. Drücken Sie die kleine Taste zweimal – die **grüne LED** leuchtet auf
4. Drücken Sie die kleine Taste zweimal – die **rote LED** leuchtet auf
5. Testen Sie mit dem eTag die Zugangskontroll-Funktion an einem Gate

Deaktivierung

1. Drücken Sie die kleine Taste viermal – die **grüne LED** leuchtet auf
2. Drücken Sie die kleine Taste dreimal – die **grüne LED** leuchtet auf
3. Drücken Sie die kleine Taste zweimal – die **grüne LED** leuchtet auf
4. Drücken Sie die kleine Taste dreimal – die **rote LED** leuchtet auf

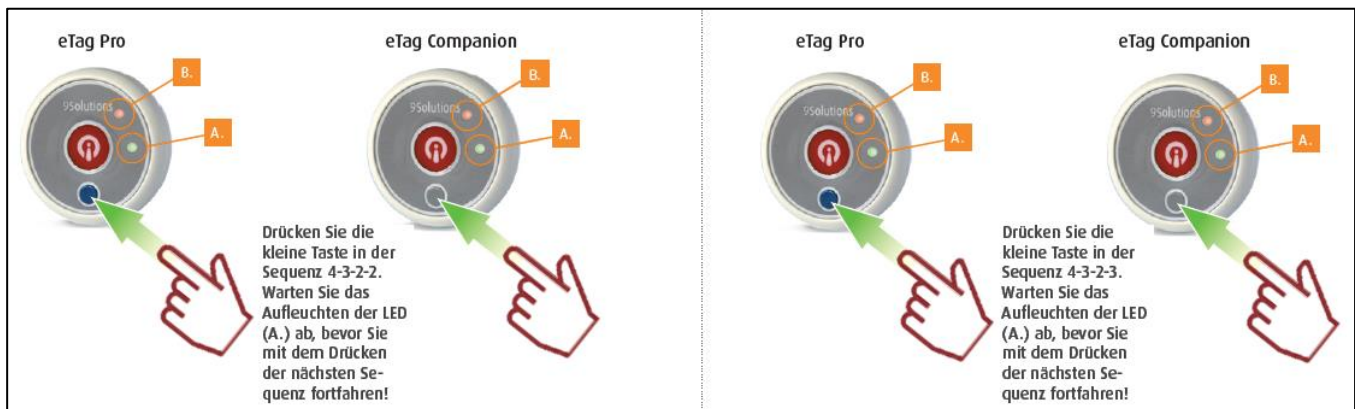

Hinweis:

- Die Aktivierung der Tags ist Tag-spezifisch, d.h., jeder Tag muss einzeln aktiviert und deaktiviert werden.
- Eine Zugangskontrolle kann in 9Solutions Systemen mit jedem 9Solutions Gate aktiviert werden.
- Wird die Zugangskontrolle mit Gates nicht verwendet, wird empfohlen, diese Funktion zu deaktivieren, da dies die Batterie-Lebensdauer erhöht.

Für weitere Informationen senden Sie einfach Ihre Anfrage an office@telecontact.at