


## Bedienung des Rufempfänger RCL07-C30

RCL07-C30 sind Rufempfänger mit Anschluss an die Rufanlage

Sie können mit allen mit Easywave Sendern ausgestatteten Geräten arbeiten:  
 Sensormatten, Bewegungsmelder, Bettfluchtbügel, Armband-/Halsband-Sender,  
 Notrufkissen, Großruftaster, Daza Bewegungsmelder, usw.

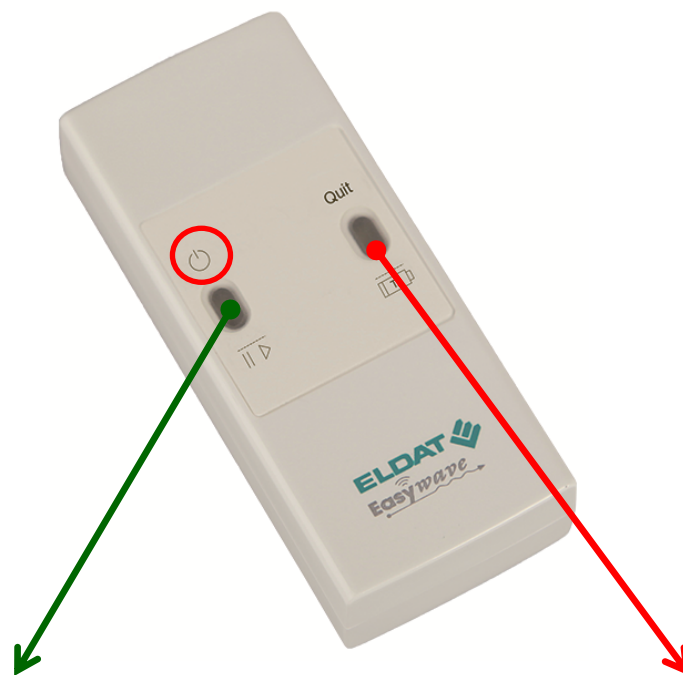

LED leuchtet grün = betriebsbereit

Funktionstaste: 

Die Schalttaste ca. 10 Sekunden lang drücken –  
 das Gerät ist nun für 15 Minuten deaktiviert

die grüne LED blinkt

Nach 15 Minuten schaltet sich das Gerät  
 automatisch wieder auf Rufempfang!

Um den Rufempfang vorher zu aktivieren, die  
 Schalttaste wieder 10 Sekunden drücken

Pflegefunktion:

Bei Auslösung eines Rufes **leuchtet die LED rot**  
 (Dauerleuchten) bis diese Taste am Gerät quittiert  
 wird.

**LED blinkt rot = Sender-Batterie schwach**

Die Batterie in Sensormatte, Bettfluchtbügel,  
 Arbandsender, Notrufkissen, usw. muss in Kürze  
 getauscht werden

**Ist die LED vollständig erloschen,  
 ist die Batterie leer**

Standard-Einstellung: Alarme an die Rufanlage werden direkt am Rufempfänger quittiert!